

取扱説明書

製品保証書付

オゾンジャグジーバス RAFIBATH (ラフィバス)

動物用

品名：オゾンジャグジーバス4080

品名：オゾンジャグジーバス60120



KAMOS
株式会社カモス

~いつも一緒にいたいから~

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、安全に製品をご使用ください。使用方法やメンテナンス、安全に関してなど重要な情報が記載されておりますので、お読みになった後も大切に保管しておいてください。製品の不具合等やお気付きの点がございましたら、下記サービスセンターへお問い合わせください。

安全のための注意事項を守る

故障したら使わない

定期的に点検をする

万一、異常がおきたら

 電源を切り、プラグをコンセントから抜いて、サービスセンターへ修理を依頼してください。

サービスセンター窓口

株式会社カモス

メール : infok@kamos.shizuka-gr.com


電話 : 03-6277-0886(平日 10:00~17:00 年末年始、夏季休暇など別途休みがございますのでご了承ください)

取扱説明書 目次

- 1、基本セットの構成
- 2、使用上の注意及び警告
- 3、機能情報
- 4、仕様
- 5、使用目的
- 6、ご使用の前（設置方法及びマットの取り付け方法）
- 7、ご使用の後
- 8、各部品の洗浄及び保管方法
- 9、フィルターの交換
- 10、保証書

1、基本セットの構成

	名 称	サイズ/ 重量
A	本体 (RA-4080)	W320×D225×H320/
	本体 (RA-60120)	W320×D225×H320/
B	ホース	1.5~2 m
C	フィルター	W55.0×D20.0×H44/3g
D	電源コード	1.8m
E	取扱説明書 (保証書付)	A5サイズ /1 冊

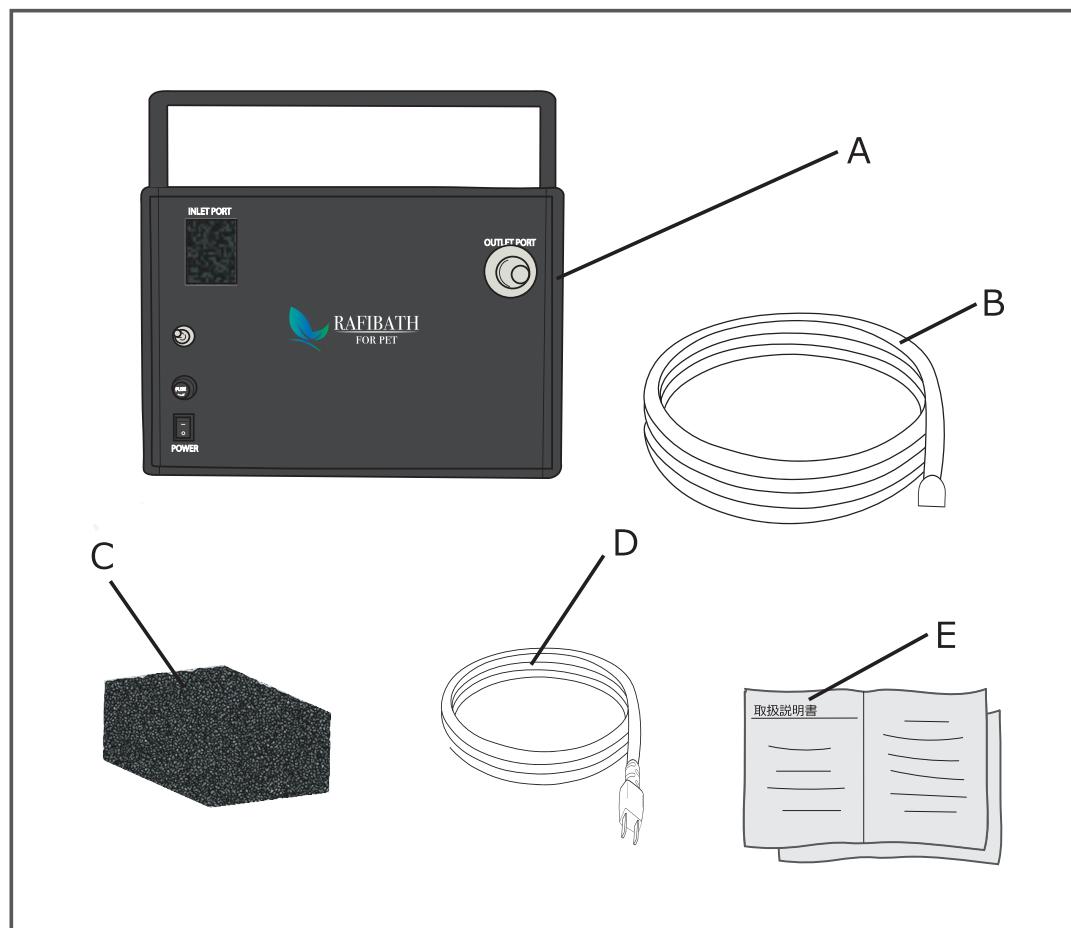

2、使用上の注意及び警告

ご使用前に必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※ここに示す注意事項は、機械を安全に使用するために重要なものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」と「注意」に区分しています。必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると人体に大きな影響を及ぼす可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると人がケガをしたり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味と例

	記号は「してはいけないこと」を意味しています。
	記号は「しなければならないこと」を意味しています。

 警告	
 分解禁止	改造は絶対にしない。専門の修理技術者以外の方は、分解したり修理をしたりしない。 火災・感電・ケガの原因になります。修理は必ず当社サービスセンターへご連絡ください。 <small>※万一開けたりした場合は、保証出来ません。</small>
 プラグを抜く	異常時（プロアやオゾン発生が停止しなかったり異臭を感じる等）は、差し込みプラグを抜く。 異常のまま運転を続けると、火災や感電の原因や健康を害する恐れがあります。 電源を抜いて、当社サービスセンターへご連絡ください。
 禁止	ホースの出口から噴出されるエアーを直接吸入しない。 健康を害する恐れがあります。
 ぬれ水手禁止	濡れた手で、差し込みプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
 使用禁止	各部品の洗浄・お手入れの際に洗剤は使用しない。 洗浄剤が残っていると、有毒ガスが発生したり、故障の原因になります。
	 オゾン使用 10 時間毎に必ずフィルターを交換する。 フィルターの購入は当社サービスセンターへご依頼ください。

2、使用上の注意及び警告

⚠ 注意	
 禁 止	<p>吸気口は絶対に塞がない。専用のフィルター以外は使用しない。 タオルや洋服などでも塞いでしまわないように注意してください。故障の原因になります。</p>
 禁 止	<p>本体装置は不安定な場所に置かない。 倒れてケガや故障の原因になります。</p>
 禁 止	<p>送風口を塞がない。 ホースに物を詰めたり、送風口を塞ぐことがないように注意してください。故障や火災・感電・ショートの原因になります。</p>
 !	<p>使用空間は、必ず十分に換気をする。 気分が悪くなったり、健康を害する恐れがあります。</p>

その他の注意

- 未成年の方は、大人の管理者がいるところで使用してください。
- 熱湯で使用しないでください。
- 濡れた手や足で本体に触れないでください。
- 浴室やシャワー室で延長コードを使用しないでください。
- 使用の際の最適な外部気温の状況は 10°C~42°Cです。
- 装置の輸送は、適切な手段（最初の状態が維持できるように）で行ってください。
- 時々は電源コンセントやプラグの点検を行ってください。
- 浴槽など使用する材質がオゾン耐性を持つことを確認してください。
- 誤った使用に起因する損害に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

3、機能情報

- 水力マッサージ
- 皮膚・被毛の洗浄・皮脂除去
- 環境衛生
- 脱臭及び消臭
- 乾燥機
- 除菌
- 手荒れ予防
- キメの細かい泡シャンプー水の作成

4、仕様

機器名称	オゾンバブル発生装置
品 名	RAFIBATH (ラフィバス)
最大消費電力	51W (RA-4080) / 125W (RA-60120)
定格電圧	100V 50/60Hz
設置方法	据置型
オゾン	<0.05ppm
最大風量	80L / 分 (RA-4080) / 120L / 分 (RA-60120)
電源コード	1.8m

5、使用目的

オゾンによるバブリング効果で、

- ①患部や皮膚・被毛の除菌で清潔に保ち、治癒を早めるサポート。
- ②室内の除菌及び消臭。
- ③人の手荒れ防止対策。
- ④泡立ちの良いシャンプー水を作る。
- ⑤皮脂の除去。
- ⑥ブロー時間の短縮（サロントリミング）

6、ご使用の前（設置方法及びマットの取り付け方法）

1、本体の設置方法

- ・必ず安定した平らな場所に設置してください。
- ・吸気口（フィルター設置口）を塞がないように、十分な隙間をあけて設置してください。（吸気口上面で設置した場合、上にものなどを被せて吸気口を塞ぐことがないように注意してください。）
- ・電源コードを引っ張ったりしないよう、コンセントの近くに設置してください。

吸気口（フィルター設置口）



6、ご使用の前（設置方法及びマットの取り付け方法）

2、マットの取り付け方法


- ①本体とホースを接続します。（図1）
- ②オゾンバス用シートタイルの接続部（図2）をホースの先端に、しっかりと奥まで差し込んで接続します。
- ③使用する浴槽（容器）にシートタイル裏面に付いている、吸盤で固定してください。

図1



ホース接続部（本体）

図2

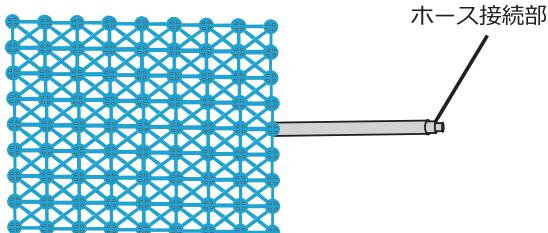

ホース接続部

7、ご使用の後

ご使用後は、電源を落としてから電源プラグをコンセントから外してください。

【マットの場合】

ホースをマットから取り外し、容器の中の水を捨ててください。

8、各部品の洗浄及び保管方法

容 器：使用後は水又は家庭用の中性洗剤でよくすすぎ洗いをしてください。

ホース：本体からホースを取り外して洗浄してください。ホースの先端を洗剤などは使わずに、水又はぬるま湯でよくすすぎ洗いをしてください。ホースの中は通常洗浄する必要はありません。ホースの中に水が入った場合は完全に乾かしてからご使用ください。

本 体：汚れた場合は乾いた布なので、拭き取ってください。湿気の多いところには保管をしないでください。

9、フィルターの交換

▪ フィルターの交換

本品オゾン発生装置は、空気中の酸素からオゾンを生成しています。そのため、空気中の不純物を取り除くフィルターの交換が必須です。

フィルターの交換は、運転時間 10 時間毎に必ず必要です。